

## Prise en charge des fistules

### Définition de fistule

Jonction anormale entre deux organes profonds ou entre un organe profond et la peau. Les facteurs de prédisposition à la formation d'une fistule comprennent une capacité de cicatrisation réduite après une chirurgie, la maladie de Crohn, la rupture de l'anastomose intestinale ou l'infection.

### Exemples de fistules

- **Fistule entérocutanée** — Jonction entre l'intestin grêle et la peau. L'écoulement sera probablement liquide, peut être d'un débit élevé et contiendra des enzymes digestives qui abîment la peau.
- **Fistule colocutanée** — Jonction entre le côlon et la peau. L'effluent peut être liquide ou semi-formé, est habituellement malodorant et peut contenir des gaz.
- **Fistule vésicocutanée** — Jonction entre la vessie et la peau par laquelle l'urine s'écoule.
- **Œsophagostomie** — Jonction de l'œsophage à la peau par laquelle s'écoulent du mucus et tout liquide administré oralement.



Fistule dans une plaie abdominale ouverte



Fistule entérocutanée

### Difficultés associées à la prise en charge des fistules

- Bien qu'il existe des facteurs prédisposants, les fistules se forment fréquemment de façon imprévue à la suite d'une chirurgie ou à cause d'une maladie et présentent donc des difficultés pour les patients, les familles et le personnel soignant.
- Elles sont souvent situées à un endroit qui complique la prise en charge (p. ex. à proximité ou à l'intérieur de lignes d'incision, de plis, de tubes ou d'autres fistules).
- Souvent, l'ouverture de la fistule est à la surface de la peau ou en dessous.
- L'écoulement est souvent corrosif pour la peau et malodorant, et peut être d'un débit élevé.

### Objectifs clés pour la gestion des soins infirmiers

- **Protéger la peau** – L'effluent d'une fistule peut être très irritant pour la peau. Les lésions cutanées sont douloureuses et inconfortables. Un champ protecteur peut empêcher que la peau n'entre en contact avec l'écoulement.
- **Contenir l'effluent** – Si l'effluent est minime, un pansement de gaze peut être suffisant pour le contenir. Cependant, si le débit d'effluent de la fistule est considérable ou si l'effluent déborde souvent du pansement, un sac collecteur peut être plus approprié. L'utilisation d'un sac peut être plus efficace et aider à limiter l'exposition des professionnels de la santé à des liquides organiques.
- **Mesurer l'effluent** – Dans le cas d'une fistule à débit élevé, la perte hydro-électrolytique peut être une préoccupation majeure. Il peut être plus facile de mesurer l'effluent avec un sac collecteur qu'avec des pansements absorbants. Songez à utiliser un système collecteur de nuit pour aider à éloigner l'écoulement du champ protecteur.
- **Gérer les coûts** – Le soin des fistules peut coûter cher en fournitures et en ressources humaines. L'utilisation d'un sac collecteur et d'accessoires appropriés peut être plus rentable et plus facile à gérer que les changements de pansements fréquents.
- **Éliminer les odeurs** – Le confinement de l'écoulement dans un sac collecteur, même en petites quantités, peut aider à éliminer les odeurs. D'autres accessoires peuvent aussi réduire les odeurs lorsqu'on change ou qu'on vide le sac.
- **Assurer le confort des patients** – La prise en charge efficace des fistules peut contribuer à la dignité et au confort des patients.

## Prise en charge des fistules

CHOIX DE PRODUITS		PROTÉGER LA PEAU	CONTENIR L'EFFLUENT	MESURER L'EFFLUENT	GÉRER LES COÛTS	ÉLIMINER LES ODEURS	ASSURER LE CONFORT
<b>Options de produits</b>	<b>Commentaires</b>						
<b>Sacs à grande capacité Premier</b> Codes: 80070 ou 80110	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Champ protecteur de port prolongé à découper</li> <li>• Peut être raccordé à un sac collecteur de nuit</li> </ul>	•	•	•	•	•	•
<b>Sacs collecteurs de plaies</b> Codes: 9773, 9776 ou 9778	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Champ protecteur de port standard à découper</li> <li>• Peut être raccordé à un sac collecteur de nuit</li> </ul>	•	•	•	•	•	•
<b>Port à cathéter universel Hollister</b> Code: 9779	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facultatif</li> <li>• Convient aux tubes qui doivent sortir d'un sac</li> </ul>			•	•		
<b>Sacs pédiatriques Pouchkins</b> Codes: 3795, 3796 ou 3797	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéal pour les petites zones où l'utilisation d'un sac est difficile ou pour un faible débit</li> </ul>	•	•	•	•	•	•
<b>Anneaux de champ protecteur Adapt</b> Codes: 7805, 7815, 7806, 8805 ou 8815	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sert à épouser les contours inégaux de la peau</li> <li>• Aide à empêcher l'écoulement sous le champ protecteur</li> </ul>	•			•		•
<b>Pâte Adapt</b> Codes: 79300 ou 79301	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sert à épouser les contours inégaux de la peau</li> <li>• Aide à empêcher l'écoulement sous le champ protecteur</li> </ul>	•					
<b>Vaporisateur éliminateur d'odeurs m9</b> Codes: 7732, 7733, 7734 ou 7735	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Désodorisant ambiant</li> </ul>					•	•
<b>Désodorisant-lubrifiant Adapt</b> Codes: 78500 ou 78501	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Élimine les odeurs durant la vidange des sacs vidables</li> <li>• Facilite la vidange des sacs vidables</li> </ul>					•	•
<b>Adhésif médical Adapt</b> Code: 7730	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide à accroître l'étanchéité du sac dans une zone difficile</li> </ul>				•		•
<b>Poudre de stomie Adapt</b> Code: 7906	<ul style="list-style-type: none"> <li>• À vaporiser sur la face adhésive du sac</li> <li>• Aide à assécher la peau humide et irritée pour assurer l'étanchéité du champ protecteur</li> </ul>				•		•
<b>Sac collecteur urinaire de nuit</b> Code: 9839	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéal pour un débit élevé d'effluent liquide</li> <li>• Offre une grande capacité de collecte de liquide</li> </ul>			•			•

Pour toute question sur les produits, pour obtenir des échantillons, ou pour toute question clinique détaillée sur nos produits, composez le **1 800 263-7400**.

Il est recommandé d'être suivi régulièrement par un professionnel de la santé.

Avant l'utilisation de tout produit ou accessoire pour stomie, assurez-vous de bien lire le mode d'emploi.

Le logo Hollister, Hollister et « Peau saine. Résultats positifs. » sont des marques de commerce de Hollister Incorporated.  
© 2017 Hollister Incorporated. 923067-1217 US-00222

**Hollister Incorporated**  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048  
1.800.323.4060

[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

**Hollister Limited**  
95 Eric T Smith Way, Unit #1  
Aurora, Ontario L4G 0Z6  
1.800.263.7400