

Rallonges de champ protecteur CeraPlus^{MC}

Renseignements généraux

- Infusé avec des céramides pour protéger votre peau
- Peuvent aider à solidifier davantage les bords autour de votre champ protecteur
- Peuvent aider à réduire le soulèvement des bords du champ protecteur
- Peuvent aider à augmenter la durée de port du champ protecteur
- Permettent un ajustement facile autour des bords de votre champ protecteur
- Épousent les plis et les creux de votre corps
- Offrent une adhérence supplémentaire pour s'adapter à une hernie péristomiale

Utilisation des rallonges de champ protecteur CeraPlus^{MC}

1. Préparer la peau en retirant le champ protecteur en place et en nettoyant la peau péristomiale. Mettre le nouveau champ protecteur ou le nouvel appareillage de stomie en place.
2. Retirer le papier au dos de la rallonge de champ protecteur en étirant légèrement chaque extrémité de la rallonge.
3. Retirer le papier sur seulement un des côtés de la rallonge.
4. Placer l'extrémité adhésive de la rallonge sur le périmètre du champ protecteur, en couvrant à la fois le champ protecteur et la peau adjacente. Retirer le reste du papier au dos de la rallonge. Passer vos doigts le long de la rallonge pour vous assurer qu'elle adhère bien.
5. Répéter l'opération pour toutes les rallonges supplémentaires dont vous avez besoin autour du champ protecteur.
6. Les rallonges se retirent facilement au moment de changer votre sac collecteur.



FOIRE AUX QUESTIONS

Puis-je utiliser des rallonges avec des champs protecteurs dotés d'une bande adhésive ?

OUI. Hollister s'engage à vous aider à obtenir un bon ajustement avec votre appareillage de stomie. Un champ protecteur avec bande adhésive est déjà conçu pour offrir une protection supplémentaire et prévenir le soulèvement des bords. L'utilisation d'une rallonge de champ protecteur peut contribuer à un plus grand sentiment de sécurité lorsque cela est nécessaire, et à augmenter la durée de port.

Ce produit aidera-t-il à maintenir en place mon appareillage de stomie ?

OUI. Ce produit aide à maintenir le champ protecteur en place et à réduire le soulèvement des bords. Si vous éprouvez des problèmes de fuites, vous devriez obtenir le soutien d'une infirmière spécialisée en soins de stomie ou d'un professionnel de la santé.

Les rallonges de champ protecteur contiennent-elles du latex ?

NON. Ce produit est fabriqué avec un adhésif hydrocolloïde et des polymères et copolymères et ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

Est-ce que l'emballage est recyclable ?

OUI. Hollister s'efforce d'être respectueuse de l'environnement et est soucieuse des ressources limitées qu'offre la planète. L'emballage en plastique est recyclable.

Puis-je utiliser moins de trois rallonges de champ protecteur ?

OUI. Les bandes permettent d'offrir une meilleure protection autour de votre champ protecteur. Utilisez les bandes aux endroits que vous jugez nécessaires ou communiquez avec une infirmière spécialisée en soins de stomie ou un professionnel de la santé pour en discuter.

Rallonges de champ protecteur CeraPlus^{MC}



NO. DE PRODUIT : 79402 - Boîte de 30

Instructions additionnelles:

Un suivi régulier avec votre professionnel de santé est recommandé.

Instructions et usage prévu : Cet accessoire pour appareillage de stomie est destiné à aider un produit de stomie à s'adapter à la peau péristomiale.

Mises en garde : Toute réutilisation d'un produit peut présenter un risque potentiel pour l'utilisateur, par exemple une mauvaise adhérence. Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent compromettre la qualité du produit. Il peut en résulter des odeurs ou des fuites.

Remarques : Pour garantir une bonne adhérence, appliquer sur une peau saine, propre et sèche. Ne pas utiliser d'huiles ou de lotions. Ces produits peuvent compromettre l'adhésion du champ protecteur. Communiquer avec une infirmière spécialisée en soins de stomie ou un professionnel de la santé pour de l'aide au sujet d'un appareillage de stomie ou d'irritations cutanées. En cas de lésion grave (incident) liée à l'utilisation du produit, communiquer avec votre distributeur ou fabricant local, ou l'autorité compétente locale. Pour de plus amples renseignements, consultez www.hollister.com/authority ou communiquez avec un spécialiste des ventes ou un distributeur local.

CE Les produits ne portent pas tous la marque CE.

Hollister, le logo Hollister et CeraPlus sont des marques de commerce de Hollister Incorporated.
© 2023 Hollister Incorporated.

Hollister Limited
95 Eric T Smith Way, Unit #1,
Aurora, Ontario, L4G 0Z6
1.800.263.7400

www.hollister.com