


Appareillage de stomie pour prématurés Pouchkins

Rassembler le matériel

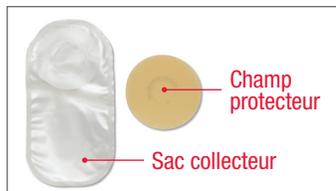

Regrouper le sac collecteur, le champ protecteur, un guide de mesure, des ciseaux, un stylo, de l'eau et de la gaze, des tampons d'ouate ou des mouchoirs.

Retirer l'appareillage de stomie qui est en place



1 Soulever délicatement un bord de l'adhésif et le tirer vers le bas en appuyant doucement sur la peau pour la décoller du champ protecteur. Mettre le sac collecteur usagé aux ordures. Ne pas le jeter dans la toilette.

Nettoyer et assécher la peau



2 Nettoyer la peau avec de l'eau ou un savon doux selon les recommandations de votre professionnel de la santé. Rincer la peau et l'assécher complètement. Ne pas appliquer d'huile, de poudre, de lotion ni de savon-lotion sur la peau.

Préparer le champ protecteur et le sac collecteur



3 Mesurer la stomie à l'aide d'un guide de mesure avant chaque application de champ protecteur.



4 Tracer la taille déterminée de l'ouverture du champ protecteur sur celui-ci. Le champ protecteur doit être placé à l'endroit où la peau et la stomie se touchent. S'assurer qu'aucune partie de la peau n'est visible entre le champ protecteur et la stomie afin de prévenir les fuites et l'irritation de la peau.



5 À l'aide de petits ciseaux incurvés, découper soigneusement dans le champ protecteur une ouverture correspondant au tracé. Ne pas découper au-delà de la ligne sur la pellicule amovible.



6 Retirer la pellicule amovible du sac collecteur.



7 Côté papier vers le haut, centrer le champ protecteur vis-à-vis de l'adhésif du sac collecteur. Maintenir ensemble pendant 10 secondes. Aucun adhésif ne doit dépasser du champ protecteur.

Installer le nouvel appareillage de stomie



8 Retirer la pellicule amovible du champ protecteur. Le mettre de côté, la face adhésive vers le haut.



9 Centrer l'ouverture du champ protecteur vis-à-vis de la stomie. Appliquer une légère pression sur le champ protecteur pendant environ une minute pour assurer une adhérence optimale.

Conseils

- L'appareillage pour prématuré (3777), dont la capacité est de 10 cc, est destiné aux nourrissons de faible poids à la naissance. Si la capacité est insuffisante, envisager d'utiliser un appareillage pour enfant plus grand, comme le sac collecteur pour nouveau-né (3778).
- Si l'appareillage pour prématuré est utilisé pour être vidangé, couper le bas juste au-dessus de la couture. Si la découpe est trop grande, la capacité du sac collecteur s'en trouvera diminuée.
- Installer la fermeture métallique souple sur l'extrémité, puis replier fermement les extrémités. Se reporter aux instructions détaillées à l'intérieur de la boîte.
- La peau autour de la stomie ne doit pas être irritée ou éraflée. Si la peau est irritée, communiquer avec une infirmière spécialisée en soins de stomie.
- Les autocollants Pouchkins (inclus dans chaque boîte) peuvent être placés sur le sac collecteur pour indiquer la date et l'heure auxquelles l'appareillage a été changé.

Informations supplémentaires

- *Prendre soin de votre enfant avec une stomie* (un livret d'information pour les parents et les soignants de nourrissons ayant une stomie).
- *Peuvent-ils encore se tortiller et rire* (un livre à colorier pour les enfants qui veulent en savoir plus sur les stomies).

