Anneaux de champ protecteur Adapt

Conseils pour soins de stomie

Anneaux de champ protecteur Adapt

Renseignements généraux


- Servent à combler les inégalités de la peau au pourtour de la stomie afin de permettre un meilleur ajustement du champ protecteur.
- Permettent d'assurer l'étanchéité de votre champ protecteur en empêchant l'écoulement de selles ou d'urine sous celui-ci.
- Peuvent êtres coupés, pliés ou empilés les uns sur les autres afin d'améliorer l'étanchéité de votre champ protecteur.

Comment utiliser les anneaux de champ protecteur Adapt

- 1. Lavez et essuyez la peau correctement.
- 2. Retirez l'anneau de l'emballage, puis retirez les protecteurs de plastique.
- 3. Étirez ou modelez l'anneau avant son application. Vous pouvez :
 - a) appliquer l'anneau contre la surface adhérente de votre champ protecteur ou
 - b) appliquer l'anneau directement sur votre peau, puis installer votre champ protecteur.
- 4. Retirez l'anneau en le tirant doucement, au moment de changer votre champ protecteur.

Questions et réponses

- Q: Quel anneau utiliser : celui de deux ou quatre pouces ? Comment choisir ?
- R: Comme l'anneau peut être étiré ou modelé facilement, la plupart des gens préfèrent utiliser celui de deux pouces.
- Q: De quel côté dois-je placer l'anneau?
- R: On peut appliquer n'importe quel côté de celui-ci contre la peau.
- Q: Ma stomie n'est pas ronde. Puis-je quand même utiliser un anneau?
- R: Oui, car les anneaux de champ protecteur Adapt peuvent être facilement modelés.
- Q: J'ai l'habitude d'utiliser une pâte. Est-ce que les anneaux sont meilleurs que la pâte ?
- R: L'emploi des anneaux de champ protecteur Adapt, au lieu de la pâte, présente de nombreux avantages. Pour certains, ils sont plus faciles à installer et à retirer. Les anneaux sont aussi plus résistants à l'érosion causée par les écoulements provenant de votre stomie.
- Q: Puis-je utiliser un anneau si ma peau est irritée ?
- R: Oui*, car les anneaux sont sans alcool et ne devraient pas causer de douleurs sur une peau irritée.

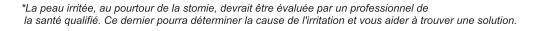





Étirez l'anneau ou empilez-les pour un meilleur ajustement.



Retirez l'anneau de l'emballage.



Retirez les protecteurs de pastique.



Modelez l'anneau pour un meilleur confort.



Anneau de 2 pouces (48 mm) code de produit 7805

Anneau de 4 pouces (98 mm) code de produit 7806



Anneaux de champ protecteur Adapt - convexes

Renseignements généraux

- Aident à créer une convexité ovale, plus importante ou plus flexible.
- Assurent une plus grande étanchéité du système en prévenant les fuites provenant de la stomie
- Peuvent être coupés ou empilés les uns sur les autres afin d'améliorer l'ajustement de votre système



Créez une convexité plus importante ou plus flexible.

Comment utiliser les anneaux de champ protecteur convexes

- 1. Lavez et essuyez la peau correctement.
- 2. Retirez l'anneau de l'emballage.
- 3. Étirez ou modelez l'anneau avant son application. Vous pouvez :
 - a) appliquer l'anneau contre la surface adhérente de votre champ protecteur ou
 - b) appliquer l'anneau directement sur la peau, puis installer votre champ protecteur.
- 4. Retirez l'anneau en le tirant doucement, au moment de changer votre champ protecteur.



Créez une convexité ovale.

Questions et réponses

Q: Comment déterminer la taille de l'anneau à utiliser ?

R: Choisissez l'anneau dont la taille se rapproche le plus de celle de votre stomie. Les anneaux peuvent être étirés légèrement afin de s'adapter à votre stomie. Ne pas trop étirer.

Les anneaux de champ protecteur convexes peuvent être étirés ainsi :

No de produit	Étirés jusqu'à
79520	1 pouce (25 mm)
79530	1 pouce 3/8 (35 mm)
79340	1 pouce 3/4 (45 mm)

Q: Qu'arrive-t-il si l'anneau est trop grand pour ma stomie?

R: Vous pouvez raccourcir la taille de l'anneau en coupant une section de celui-ci et en pressant les extrémités l'une contre l'autre pour le refermer.

Q: Le côté de l'anneau collé à ma peau importe-t-il?

R: Oui. Le côté surélevé (convexe) doit reposer contre votre peau. Si vous placez l'anneau sur le champ protecteur, placez le côté plat contre le celui-ci.

Q: Puis-je les utiliser si ma peau est irritée ?

R: Oui*, car les anneaux de champ protecteur convexes sont sans alcool et ne devraient pas causer de douleurs sur une peau irritée.



Placez le côté plat sur l'anneau sur le champ protecteur.



Anneaux de champ protecteur Adapt – convexes code de produit 795xx

*La peau irritée, au pourtour de la stomie, devrait être évaluée par un professionnel de la santé qualifié. Ce dernier pourra déterminer la cause de l'irritation et vous aider à trouver une solution.



Hollister Incorporated 2000 Hollister Drive Libertyville, Illinois 60048 USA 1.800.323.4060

Distribué au Canada par Hollister Limitée 95 Mary Street Aurora, Ontario L4G 1G3 1.800.263.7400

www.hollister.com