

## Désodorisant lubrifiant Adapt

### Renseignements généraux

- Le désodorisant lubrifiant **Adapt** neutralise les odeurs, facilite la vidange, prévient l'électricité statique et aide à empêcher le sac de coller
- Il ne s'agit pas d'un parfum, ni d'un agent masquant
- Le désodorisant lubrifiant Adapt devrait être utilisé dans les sacs collecteurs à vider ou fermés seulement

### Sacs à vider

1. Installez le sac.
2. Flacon : Ajoutez environ 5 ml, ou 1 c. à thé, dans le sac (illustration 1).  
Sachet : Ajoutez le contenu du sachet au fond du sac (illustration 2). Fermez le sac normalement.
3. Frottez pour bien enduire l'intérieur du sac (illustration 3). Répétez l'étape 2 chaque fois que vous videz le sac.

### Sacs fermés

1. Ajoutez le désodorisant lubrifiant Adapt avant d'enlever la pellicule protectrice de champ protecteur (sac 1-pièce seulement).
2. Flacon : Versez environ 5 ml, ou 1 c. à thé, dans l'ouverture du sac (illustration 4).  
Sachet : Versez le contenu du sachet dans l'ouverture du sac.
3. Installez le sac.
4. Frottez pour bien enduire l'intérieur du sac (illustration 3).



### QUESTIONS ET RÉPONSES

Est-ce grave si le désodorisant lubrifiant Adapt entre en contact avec le filtre du sac?

Lorsque vous enduisez l'intérieur du sac, il est préférable d'éviter le filtre.

Dois-je utiliser le désodorisant lubrifiant Adapt chaque fois que je vide mon sac?

Oui. Pour assurer l'efficacité de cet accessoire de stomie, il faut l'ajouter chaque fois que votre sac est vidé.

Puis-je simplement mettre quelques gouttes au fond du sac sans frotter les parois intérieures?

Non, ce n'est pas recommandé puisque le lubrifiant et le désodorisant ne seront pas efficaces. Le fait de frotter le sac aide à enduire la pellicule intérieure du sac.

N'est-ce pas plus facile d'utiliser un aérosol ou une huile de cuisson pour enduire l'intérieur de mon sac?

Ce n'est pas recommandé parce que l'huile de cuisson peut réduire l'étanchéité du sac. De plus, les aérosols et huiles de cuisson n'éliminent pas les odeurs.

## Désodorisant lubrifiant Adapt

QUESTIONS ET RÉPONSES	
Le flacon de 236 ml n'est pas pratique dans les salles de bains publiques. Existe-t-il un format plus petit?	Le désodorisant lubrifiant Adapt est également offert en sachets à usage unique. Cet emballage est beaucoup plus discret et pratique à l'extérieur.
Cela ne sent rien. Comment est-ce que je sais que le produit fonctionne?	Le désodorisant lubrifiant Adapt n'est pas un parfum ni une fragrance qui sert à masquer les odeurs. Il ne sent rien, mais il neutralise les odeurs du sac.
Le désodorisant lubrifiant Adapt peut-il entrer en contact avec la stomie?	Oui, il a été testé, et il est sans danger pour la stomie.
Que dois-je faire si le désodorisant lubrifiant Adapt entre en contact avec ma peau?	Ce produit n'irrite pas la peau. Il est soluble dans l'eau, donc vous pouvez facilement l'enlever en essuyant la peau avec une débarbouillette humide. Assurez-vous de l'enlever avant d'installer votre nouveau champ protecteur pour ne pas réduire l'adhérence.



Désodorisant lubrifiant Adapt

Code de produit 78500  
(flacon de 236 ml ou 8 oz)

Code de produit 78501  
(boîte de 50 sachets de 8 ml)

Il est recommandé d'être suivi régulièrement par un professionnel de la santé.

**Indications et utilisation prévue :** Ce produit est un accessoire de stomie servant à réduire les odeurs et à faciliter la vidange du sac collecteur.

**Précautions :** Ne pas utiliser avec d'autres additifs pour sac. Ne pas utiliser sur des plaies ni ingérer. En cas d'irritation cutanée, cesser l'emploi et laver soigneusement la peau. Tenir hors de la portée des nourrissons et des enfants.

**Flacon (un seul patient — utilisations multiples) :** L'utilisation du même produit pour plusieurs patients crée un risque d'infection. Peut être utilisé jusqu'à ce que le flacon soit vide.

**Sachet (mise en garde) :** Pour aider à réduire le risque d'infection et d'autres complications, ne pas réutiliser.

**Remarques :** Évitez tout contact avec l'adhésif du champ protecteur. Évitez tout contact avec le filtre. Consultez une infirmière spécialisée en soins de stomie pour obtenir de l'aide avec votre appareillage de stomie ou en cas d'irritation de la peau. En cas de blessure grave (incident) découlant de l'utilisation du produit, veuillez communiquer avec votre distributeur, votre détaillant local ou le fabricant. Pour de plus amples renseignements, consultez le [www.hollister.com/authority](http://www.hollister.com/authority) ou communiquez avec votre représentant Hollister.

### Mode d'emploi : Application

**Étape 1 Flacon :** Ajoutez environ 5 ml ou 1 c. à thé.

**Sachet :** Ajoutez le contenu du sachet. Fermez le sac normalement (le cas échéant).

**Étape 2** Frottez pour bien enduire l'intérieur du sac. Remarque : Dans le cas des sacs à vider, répétez les étapes 1 et 2 après chaque vidange.

**Mise au rebut :** Veuillez respecter tous les règlements locaux relatifs aux déchets.

**CE** Les produits ne sont pas tous dotés du marquage « CE ».

Le logo Hollister, Adapt et « Peau saine. Résultats positifs. » sont des marques de commerce de Hollister Incorporated.  
© 2020 Hollister Incorporated.

**Hollister Incorporated**  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048  
1.800.323.4060

[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

**Hollister Limited**  
95 Eric T Smith Way, Unit #1,  
Aurora, Ontario, L4G 0Z6  
1.800.263.7400