


Appareillage de stomie pour nouveau-né Pouchkins

Rassembler le matériel

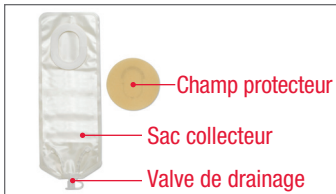

Regrouper le sac collecteur, le champ protecteur, un guide de mesure, des ciseaux, un stylo, de l'eau et de la gaze, des tampons d'ouate ou des mouchoirs.

Retirer l'appareillage en place



Soulever délicatement un bord de l'adhésif et le tirer vers le bas en appuyant doucement sur la peau pour la décoller du champ protecteur. Mettre le sac collecteur usagé aux ordures. Ne pas le jeter dans la toilette.

Nettoyer et assécher la peau



Nettoyer la peau avec de l'eau ou un savon doux selon les recommandations de votre professionnel de la santé. Rincer la peau et l'assécher complètement. Ne pas appliquer d'huile, de poudre, de lotion ni de savon-lotion sur la peau.

Préparer le champ protecteur et le sac collecteur



Mesurer la stomie à l'aide d'un guide de mesure avant chaque application de champ protecteur



Tracer la taille déterminée de l'ouverture du champ protecteur dans celui-ci. Le champ protecteur doit être placé à l'endroit où la peau et la stomie se touchent. S'assurer qu'aucune partie de la peau n'est visible entre le champ protecteur et la stomie afin de prévenir les fuites et l'irritation de la peau.



À l'aide de petits ciseaux incurvés, découper soigneusement dans le champ protecteur une ouverture correspondant au tracé. Ne pas découper au-delà de la ligne sur la pellicule amovible.



Retirer la pellicule amovible du sac.



Côté papier vers le haut, centrer le champ protecteur vis-à-vis de l'adhésif du sac. Maintenir ensemble pendant 10 secondes. Aucun adhésif ne doit dépasser du champ protecteur.

Installer le nouvel appareillage de stomie



Retirer la pellicule amovible du champ protecteur. Le mettre de côté, la face adhésive vers le haut. Fermer la valve de drainage située au bas du sac en mettant le bouchon.



Centrer l'ouverture du champ protecteur vis-à-vis de la stomie. Appliquer une légère pression sur le champ protecteur pendant environ une minute pour assurer une adhérence optimale.

Conseils

- La sac collecteur pour nouveau-né est doté d'un bec au bas. Si l'écoulement devient trop épais, il est possible de couper le bec du sac à l'emplacement souhaité. Découper les stabilisateurs en plastique situés à l'intérieur du sac et les retirer.
- Installer la fermeture métallique souple incluse dans la boîte. Se reporter aux instructions détaillées à l'intérieur de la boîte. Si la découpe est trop grande, la capacité du sac s'en trouvera diminuée.
- Vider le sac lorsqu'il est rempli de rejets ou de gaz au tiers ou à la moitié de sa capacité maximale. Si la capacité est insuffisante, envisager d'utiliser un sac collecteur pour enfant plus grand.
- La peau autour de la stomie ne doit pas être irritée ou éraflée. Si la peau est irritée, communiquer avec une infirmière spécialisée en soins de stomie.

