


Appareillage de stomie une-pièce Pouchkins

Rassembler le matériel

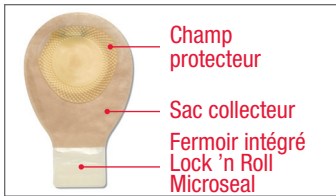

Regrouper le sac collecteur, des ciseaux, un stylo, de l'eau et de la gaze, des tampons d'ouate ou des mouchoirs.

Retirer l'appareillage de stomie en place



Soulever délicatement un bord du champ protecteur et le tirer vers le bas en appuyant doucement sur la peau pour la décoller. Mettre le sac collecteur usagé aux ordures. Ne pas le jeter dans la toilette.

Nettoyer et assécher la peau



Nettoyer la peau avec de l'eau ou un savon doux selon les recommandations de votre professionnel de la santé. Rincer la peau et l'assécher complètement. Ne pas appliquer d'huile, de poudre, de lotion ni de savon-lotion sur la peau.

Préparer le champ protecteur et le sac collecteur



Mesurer la stomie à l'aide d'un guide de mesure avant chaque application d'un champ protecteur.



Tracer la taille déterminée de l'ouverture du champ protecteur sur celui-ci. Le champ protecteur doit être placé à l'endroit où la peau et la stomie se touchent. S'assurer qu'aucune partie de la peau n'est visible entre le champ protecteur et la stomie afin de prévenir les fuites et l'irritation de la peau.



Tirer sur la pellicule du sac pour la décoller du champ protecteur. À l'aide de petits ciseaux incurvés, découper soigneusement dans le champ protecteur une ouverture correspondant au tracé. Ne pas découper au-delà de la ligne sur la pellicule amovible. Ne pas perforer le sac collecteur.



Retirer la pellicule amovible du champ protecteur. La mettre de côté, la face adhésive vers le haut.



Installer le nouvel appareillage

Centrer l'ouverture du champ protecteur vis-à-vis de la stomie.



Appliquer une légère pression sur le champ protecteur pendant environ une minute pour assurer une adhérence optimale.



Fermer le bas du sac collecteur. Si un sac vidable est utilisé, fermer le fermetre intégré **Lock 'n Roll Microseal** situé au bas du sac collecteur. Replier trois fois jusqu'à ce que les attaches en plastique se rejoignent. Appuyer fermement du centre vers les bords extérieurs le long de la bande de fermeture.



Si un sac pour urostomie est utilisé, fermer le bec qui se trouve au bas du sac collecteur.

Appareillage de stomie une-pièce Pouchkins

Utilisation d'accessoires (selon les recommandations de votre professionnel de la santé)



La pâte peut être appliquée sur le champ protecteur avant l'application.



Les anneaux peuvent être utilisés pour couvrir les zones de la peau près de la stomie et remplacer la pâte.



Il est possible d'utiliser de la poudre pour stomie lorsque la peau est abîmée et humide.

Conseils



La peau autour de la stomie ne doit pas être irritée ou éraflée. Si la peau est irritée, communiquer avec votre infirmière spécialisée en soins de stomie.



Les autocollants **Pouchkins** (inclus dans chaque boîte) peuvent être placés sur le sac pour indiquer la date et l'heure auxquelles le sac collecteur a été changé.

Instructions supplémentaires :

Un suivi régulier auprès d'un professionnel de la santé est recommandé. La peau doit toujours être propre et sèche avant l'application d'un champ protecteur.

Mode d'emploi : Un sac collecteur vidable et un champ protecteur adapté aux changements fréquents d'appareillages ou à une utilisation sur une peau fragile. Le sac collecteur est conçu pour être vidé. L'appareillage convient davantage aux colostomies ou aux iléostomies. Le produit est fabriqué à partir d'un hydrocolloïde qui adhère à la peau, de plastique polymère/copolymère et de tissu non tissé.

Indications et usage prévu : Ce produit est conçu pour recueillir l'écoulement d'une stomie (p. ex., colostomie, iléostomie) ou d'une ouverture cutanée (p. ex., blessure, fistule).

Avertissements : La réutilisation d'un produit à usage unique risque de créer des problèmes d'adhérence pour l'utilisateur. Toute tentative de retraitement, de nettoyage, de désinfection ou de stérilisation peut endommager le produit. Des odeurs et des fuites peuvent en résulter. S'assurer de l'ajustement approprié selon les instructions. Si l'ouverture du champ protecteur est inadéquate ou si une fuite survient, des lésions cutanées peuvent se produire (p. ex. irritation, éraflure, éruption ou rougeur). La durée de port pourrait alors être écourtée.

Remarques : Pour assurer une bonne adhérence, appliquer le produit sur une peau propre, sèche et intacte. Ne pas appliquer d'huile ni de lotion. Ces produits peuvent réduire l'adhérence du champ protecteur. L'ajustement du produit dépend de plusieurs facteurs, comme le type de stomie et d'écoulement, l'état de la peau et la forme de l'abdomen. Communiquer avec une infirmière spécialisée en soins de stomie ou un professionnel de la santé pour obtenir de l'aide avec l'appareillage de stomie ou en cas d'irritation cutanée. En cas de blessure grave (incident) liée à l'utilisation du produit, communiquer avec le distributeur ou fabricant local et avec l'autorité compétente de la région. Pour en savoir plus, consulter le site www.hollister.com/authority ou communiquer avec le représentant autorisé ou le distributeur local.

CE Certains produits ne portent pas le marquage CE.

Le logo Hollister, Lock 'n Roll, Pouchkins et « Peau Saine. Résultats positifs. » sont des marques de commerce de Hollister Incorporated.

© 2021 Hollister Incorporated.

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1 800 323-4060

www.hollister.com