


Appareillage deux pièces Pouchkins

Rassembler le matériel

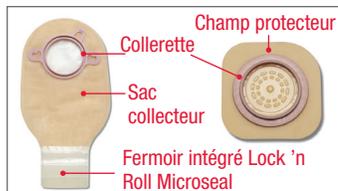

Regrouper le sac collecteur, le champ protecteur, des ciseaux, un stylo, de l'eau et de la gaze, des tampons d'ouate ou des mouchoirs.

Retirer l'appareillage en place



Soulever délicatement un bord de l'adhésif et le tirer vers le bas en appuyant doucement sur la peau pour la décoller du champ protecteur. Mettre le sac collecteur et le champ protecteur usagés aux ordures. Ne pas le jeter dans la toilette.

Nettoyer et assécher la peau



Nettoyer la peau avec de l'eau ou un savon doux selon les recommandations de votre professionnel de la santé. Rincer la peau et l'assécher complètement. Ne pas appliquer d'huile, de poudre, de lotion ni de savon-lotion sur la peau.

Préparer le champ protecteur et le sac collecteur



Mesurer la stomie à l'aide d'un guide de mesure avant chaque application de champ protecteur.

Installer le nouvel appareillage de stomie



Tracer la taille déterminée de l'ouverture du champ protecteur sur celui-ci. Le champ protecteur doit être placé à l'endroit où la peau et la stomie se touchent. S'assurer qu'aucune partie de la peau n'est visible entre le champ protecteur et la stomie afin de prévenir les fuites et l'irritation de la peau.



À l'aide de petits ciseaux incurvés, découper soigneusement dans le champ protecteur une ouverture correspondant au tracé. Ne pas découper au-delà de la ligne sur la pellicule amovible.



Retirer la pellicule amovible du champ protecteur. Le mettre de côté, la face adhésive vers le haut.



Centrer l'ouverture du champ protecteur vis-à-vis de la stomie. Appliquer une légère pression sur le champ protecteur pendant environ une minute pour assurer une adhérence optimale.



Attacher le sac collecteur au champ protecteur en emboîtant le bord inférieur de la collerette du sac et la collerette du champ protecteur. Presser les deux collerettes l'une contre l'autre. Une série de « clics » confirmera que la manœuvre a bien été effectuée. Lorsque plus aucun « clic » ne se fait entendre, le sac collecteur est bien fixé.



Fermer le bas du sac collecteur. Si un sac vidable est utilisé, clore le fermoir intégré **Lock 'n Roll Microseal** situé au bas du sac collecteur ou utiliser un clamp. Replier trois fois jusqu'à ce que les attaches en plastique se rejoignent. Appuyer fermement du centre vers les bords extérieurs le long de la bande de fermeture.

Conseils



La peau autour de la stomie ne doit pas être irritée ou éraflée. Si la peau est irritée, communiquer avec une infirmière spécialisée en soins de stomie



Les autocollants **Pouchkins** (inclus dans chaque boîte) peuvent être placés sur le sac collecteur pour indiquer la date et l'heure auxquelles l'appareillage a été changé

Si un sac pour urostomie est utilisé, s'assurer que la valve de drainage est fermée. Le symbole de goutte d'eau présent sur la valve de drainage doit se trouver contre le corps.

Le capuchon fourni dans la boîte peut ou non être installé.



Appareillage deux pièces Pouchkins

Utilisation des accessoires (selon les recommandations d'un professionnel de la santé)



La pâte peut être appliquée sur le champ protecteur avant l'application.



Les anneaux peuvent être utilisés pour couvrir les zones de la peau près de la stomie et remplacer la pâte.



Il est possible d'appliquer sur la peau de la poudre pour stomie lorsque la peau est abîmée et humide.



Une ceinture de stomie peut être recommandée par l'infirmier(ère). La ceinture doit être bien ajustée mais pas trop serrée et doit être portée à la même hauteur que la stomie. Consulter le mode d'emploi.

Instructions supplémentaires :

Un suivi régulier auprès d'un professionnel de la santé est recommandé. La peau doit toujours être propre et sèche avant l'application du champ protecteur.

Mode d'emploi : Un sac collecteur vidable et un champ protecteur adapté aux changements fréquents d'appareillages ou à une utilisation sur une peau fragile. Le sac collecteur est conçu pour être vidé. L'appareillage convient davantage aux colostomies ou aux iléostomies. Le produit est fabriqué à partir d'un hydrocolloïde qui adhère à la peau, de plastique polymère/copolymère et de tissu non tissé.

Indications et utilisation prévue : Ce produit est conçu pour recueillir l'écoulement d'une stomie (p. ex., colostomie, iléostomie) ou d'une ouverture cutanée (p. ex., blessure, fistule).

Avvertissements : La réutilisation d'un produit à usage unique risque de créer des problèmes d'adhérence pour l'utilisateur. Toute tentative de retraitement, de nettoyage, de désinfection ou de stérilisation peut endommager le produit. Des odeurs et des fuites peuvent en résulter. S'assurer de l'ajustement approprié selon les instructions. Si l'ouverture du champ protecteur est inadéquate ou si une fuite survient, des lésions cutanées peuvent se produire (p. ex. irritation, éraflure, éruption ou rougeur). La durée de port pourrait alors être écourtée.

Remarques : Pour assurer une bonne adhérence, appliquer le produit sur une peau propre, sèche et intacte. Ne pas appliquer d'huile ni de lotion. Ces produits peuvent réduire l'adhérence du champ protecteur. L'ajustement du produit dépend de plusieurs facteurs, comme le type de stomie et d'écoulement, l'état de la peau et la forme de l'abdomen. Communiquer avec une infirmière spécialisée en soins de stomie ou un professionnel de la santé pour obtenir de l'aide avec l'appareillage de stomie ou en cas d'irritation cutanée. En cas de blessure grave (incident) liée à l'utilisation du produit, communiquer avec le distributeur ou fabricant local et avec l'autorité compétente de la région. Pour en savoir plus, consulter le site www.hollister.com/authority ou communiquer avec le représentant autorisé ou le distributeur local.

CE Certains produits ne portent pas le marquage CE.

Le logo Hollister, Lock 'n Roll, Pouchkins et « Peau saine. Résultats positifs » sont des marques de commerce de Hollister Incorporated.
© 2021 Hollister Incorporated.

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1 800 323-4060

www.hollister.com