

Tampons protecteurs et tampons dissolvants tout usage Adapt

Tampons protecteurs Adapt

Renseignements généraux

- Utilisés pour diminuer le risque d'endommager la peau lorsque vous enlevez le champ protecteur.
- Appliquez une fois que la peau est propre et sèche.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser un tampon protecteur si vous utilisez un champ de port prolongé, tels que les champs protecteurs Flexextend et CeraPlus de Hollister, puisqu'un tel tampon aura pour effet de réduire l'adhérence de ceux-ci.



Tampons protecteurs Adapt

Code de produit 7917

Comment utiliser le tampon protecteur Adapt

1. Lavez et essuyez la peau correctement.
2. Ouvrez le sachet contenant le tampon et sortez-le. Appliquez une fine couche protectrice sur la surface de la peau qui sera recouverte par votre champ protecteur.
3. Attendez que la zone soit sèche au toucher.
4. Appliquez votre champ protecteur ainsi que votre sac collecteur comme à l'habitude.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Devons-nous toujours utiliser des tampons protecteurs?

Non, car il s'agit d'un produit optionnel. Utilisez-les si vous changez fréquemment votre champ protecteur, afin de protéger les zones plus sensibles de votre peau. Il n'est pas recommandé d'utiliser un tampon protecteur Adapt, ou tout produit similaire de la compétition, si vous utilisez un champ de port prolongé, tels que les champs protecteurs Flexextend ou CeraPlus de Hollister.

Les tampons protecteurs Adapt rendent-ils ma peau plus collante et permettent-ils une meilleure adhérence du champ protecteur ?

Non, car il ne s'agit pas d'un adhésif. Ils ne font qu'ajouter une couche protectrice à la surface de votre peau.

**Une évaluation de la peau irritée, au pourtour de la stomie, devrait être réalisée par un spécialiste de la santé qui pourra ainsi déterminer la cause de ce problème et vous suggérer des moyens permettant d'éviter de tels désagréments dans le futur.*

Tampons dissolvants tout usage Adapt

Renseignements généraux

- Utilisés pour enlever l'adhésif des champs protecteurs
- Utilisés pour enlever les résidus collants laissés sur la peau

Comment utiliser les tampons dissolvants tout usage Adapt

1. Ouvrez le sachet contenant le tampon dissolvant et sortez-le.
2. Appliquez doucement le tampon contre la peau à mesure que vous retirez votre champ protecteur.
3. Appliquez le tampon sur toute surface de peau où il reste des résidus d'adhésif.
4. Nettoyez la peau avec du savon et de l'eau, rincez et séchez correctement.
5. Appliquez votre nouvel appareillage de stomie



**Tampons dissolvants
tout usage Adapt**
Code de produit 7760

QUESTIONS ET RÉPONSES

Devons-nous toujours utiliser des tampons dissolvants ?

Non, car il s'agit d'un produit optionnel. Utilisez les tampons dissolvants afin d'enlever les résidus d'adhésif sur votre peau, ou afin de faciliter le retrait du champ protecteur.

Pourquoi dois-je laver ma peau avec du savon et de l'eau après avoir utilisé un tampon dissolvant ?

Ce tampon contient un solvant. Si ce dernier n'est pas complètement éliminé de votre peau, il peut nuire à l'adhérence du prochain champs protecteur que vous appliquerez.