


Ceinture de stomie Adapt

Renseignements généraux

Une ceinture de stomie peut :

- Améliorer l'adhérence de l'appareillage de stomie
- Procurer un sentiment de sécurité lorsque l'appareillage est porté régulièrement ou lors d'activités
- Établir une durée de port plus prévisible de l'appareillage de stomie
- Améliorer la convexité d'un champ protecteur convexe


Comment utiliser la ceinture de stomie Adapt

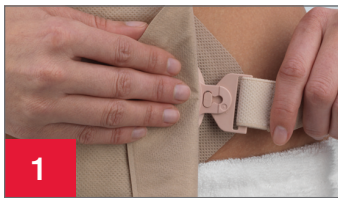

Attachez la ceinture à un anneau d'ancrage du sac collecteur, la languette orientée vers l'avant.



Tirez sur la ceinture et assurez-vous que la languette est bien engagée en position verrouillée.

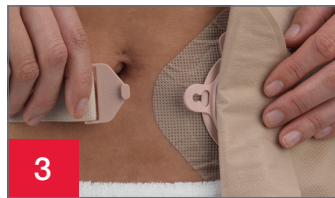


Faites passer la ceinture derrière la taille de sorte que son extrémité soit distante de 3,8 à 5 cm (1 1/2 à 2 po) de l'anneau d'ancrage le plus près lorsque la ceinture n'est pas étirée.



Vous devrez peut-être ajuster la longueur de la ceinture.



Étirez la ceinture et attachez-la à l'autre anneau d'ancrage du sac, la languette orientée vers l'avant.

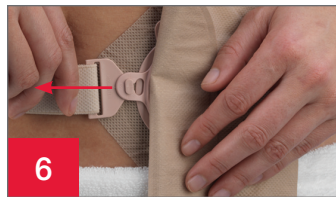

Tirez une fois de plus sur la ceinture et assurez-vous que la languette est bien engagée en position verrouillée.



La ceinture doit être alignée à la même hauteur que les ancrages.

Conseils

- La ceinture doit être bien ajustée sans être trop serrée, car cela pourrait créer des points de pression.
- Lorsque la ceinture est attachée, vous devriez pouvoir glisser aisément deux doigts entre la ceinture et la peau.
- Si la ceinture remonte vers votre taille, remplacez-la adéquatement.

Ceinture de stomie Adapt

FOIRE AUX QUESTIONS

Q: Dans quelles couleurs et tailles la ceinture de stomie Adapt est-elle offerte?

R: La ceinture de stomie Adapt est de couleur beige discrète et est offerte en deux tailles :

NO. DE PRODUIT	TAILLE
7300	MOYENNE 23" - 43" (58-109 cm)
7299	GRANDE 34" - 65" (86-165 cm)



Q: Puis-je laver ma ceinture?

R: Oui. La ceinture de stomie Adapt se lave à la main à l'eau froide avec un savon doux et doit être suspendue pour sécher. Prendre soin de la ceinture prolongera sa durée de vie.

Q: À quelle fréquence devrais-je remplacer ma ceinture?

R: La ceinture de stomie Adapt est élastique et s'étirera après un usage répété. Vous devez généralement remplacer votre ceinture deux ou trois fois par année pour assurer son efficacité. La plupart des gens ont au moins deux ceintures : une qu'ils portent quotidiennement, et une autre de rechange.

Q: La ceinture de stomie Adapt contient-elle du latex?

R: La ceinture de stomie Adapt ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

Q: À quel point devrais-je serrer la ceinture?

R: Il est important de bien ajuster la ceinture pour garder le sac collecteur en place sans exercer de pression excessive. Lorsque la ceinture est attachée, vous devriez pouvoir glisser aisément deux doigts entre la ceinture et la peau.

Q: Est-ce nécessaire de porter une ceinture?

R: Non. Le port d'une ceinture est souvent une préférence personnelle. Certaines personnes choisissent de porter une ceinture en tout temps. D'autres en portent une à des moments particuliers, comme pour faire de l'exercice. D'autres encore n'en portent jamais. Votre infirmière spécialisée en soins des plaies, des stomies et de la continence ou en stomiothérapie pourrait vous recommander de porter une ceinture pour vous aider à établir une durée de port de l'appareillage de stomie plus prévisible.

Q: Existe-t-il des ceintures de stomie pour enfants?

R: Oui. Hollister offre une ceinture de stomie pédiatrique conçue pour une utilisation avec l'appareillage de stomie deux pièces Pouchkins.

NO. DE PRODUIT	TAILLE
3774	10" - 17" (25-43 CM)

Pour toutes questions générales ou questions cliniques particulières concernant nos produits, ou pour obtenir des échantillons, veuillez téléphoner au **1-800-263-7400**.

Un suivi régulier avec votre professionnel de la santé est recommandé.

Avant d'utiliser des produits ou des accessoires de stomie, assurez-vous de lire l'ensemble des feuillets d'information et des étiquettes qui les accompagnent.

Hollister tient à remercier Jo Hoeflok, RN (EC), BSN, MA, CETN(C), CGN(C) de l'hôpital St. Michaels à Toronto, au Canada, pour sa participation à l'élaboration de ce dépliant.

Le logo Hollister, Roll et « Peau saine. Résultats positifs. » sont des marques déposées de Hollister Incorporated.
© 2017 Hollister Incorporated 923062

www.hollister.com

Hollister Limited
95 Eric T Smith Way, Unit #1,
Aurora, Ontario, L4G 0Z6
1.800.263.7400