

Renseignements généraux

- Le désodorisant-lubrifiant Adapt élimine les odeurs, aide à vider le sac collecteur et empêche les parois de celui-ci de se coller entre-elles.
- Il ne s'agit ni d'un parfum, ni d'un élément masquant les odeurs.
- Le désodorisant-lubrifiant Adapt peut être utilisé avec des sacs collecteurs à vider ou fermés.



Figure 1

Pour les sacs à vider

1. Appliquez le sac
2. **Bouteille** : ajoutez approximativement 5ml ou 1 cuiller à thé (Figure 1).
Sachet : ajoutez le contenu complet du sachet (Figure 2).
Fermez le sac normalement.
3. Frottez les parois du sac contre elles, afin de bien répartir le lubrifiant(Figure 3).



Figure 2

Pour les sacs fermés

1. Ne retirez pas la pellicule derrière le champ protecteur (si vous utilisez un système une pièce) avant d'ajouter le lubrifiant.
2. **Bouteille** : ajoutez approximativement 5ml ou 1 cuiller à thé (Figure 4).
Sachet : ajoutez le contenu complet du sachet. Appliquez votre sac.
3. Frottez les parois du sac contre elles, afin de bien répartir le lubrifiant (Figure 3).



Figure 3

Questions et réponses

Q: Y-a-t-il un problème si le désodorisant-lubrifiant Adapt entre en contact avec le filtre du sac collecteur ?

R: Lorsque le lubrifiant est appliqué à l'intérieur du sac, il est préférable d'éviter tout contact avec le filtre.

Q: Ai-je besoin d'employer le désodorisant-lubrifiant Adapt chaque fois que je vide mon sac ?

R: Oui, le produit doit être utilisé à chaque fois que vous avez terminé de vider votre sac afin de lui permettre de bien remplir sa mission.

Q: Si j'introduis seulement quelques gouttes du désodorisant-lubrifiant au fond du sac et que je ne frotte pas celui-ci contre les parois, est-ce que cela suffit ?

R: Non. De fait, cela n'est pas recommandé car une si faible quantité n'aura aucune efficacité et ce, tant au niveau de la lubrification que de la désodorisation. Le fait de frotter les parois l'une contre l'autre aide à bien étendre le lubrifiant à l'intérieur du sac.



Figure 4

Q: Ne serait-il pas plus facile et moins coûteux d'employer un enduit à cuisson afin de lubrifier l'intérieur de mon sac?

R: Une telle pratique n'est absolument pas recommandée car l'enduit ou l'huile à cuisson peut nuire à l'étanchéité de votre sac. De plus, les enduits à cuisson n'éliminent pas les odeurs.

Q: Le format de la bouteille de 8 onces n'est pas très pratique dans les salles de bain publiques. Y-a-t-il un plus petit format disponible?

R: Le désodorisant-lubrifiant Adapt est aussi offert en sachets à usage unique, qui sont plus discrets et plus pratiques, lorsque vous devez vous absenter de la maison.

Q: Le produit ne dégage aucune odeur. Comment puis-je savoir que cela fonctionne?

R: Le désodorisant-lubrifiant Adapt n'est ni un parfum, ni une fragrance. Il est inodore et conserve les odeurs dans le sac.

Q: Le désodorisant-lubrifiant Adapt peut-il entrer en contact avec la stomie?

R: Oui. Des tests à cet effet ont été réalisés et il a été prouvé que le produit n'endommagera pas votre stomie.

Q: Que se passe-t-il si le désodorisant-lubrifiant Adapt entre en contact avec ma peau?

R: Ce produit n'irrite pas la peau. Comme il est soluble, il peut être facilement essuyé à l'aide d'un linge humide.

Note : Évitez tout contact avec l'adhésif des champs protecteurs (collerettes). N'employez qu'à l'intérieur des sacs pour stomies seulement.



Désodorisant-Lubrifiant
Adapt
78500 / 78501