

Renseignements généraux

- Permet de combler les inégalités de la peau au pourtour de la stomie
- Diminue le risque d'écoulement de selles ou d'urine sous le champ protecteur

Comment utiliser la pâte Adapt

1. Lavez et essuyez la peau correctement.
2. Appliquez une légère quantité de pâte au pourtour de l'ouverture du champ protecteur (Figure 1). Laissez sécher la pâte, le temps d'enlever le champ protecteur qui est déjà en place, de nettoyer la peau et bien l'assécher.
3. Si nécessaire, ajoutez une couche supplémentaire de pâte Adapt pour combler toutes les inégalités importantes de la peau.
4. Appliquez votre système comme d'habitude.



Figure 1

Questions et réponses

Q: Est-ce que la pâte permet une meilleure adhérence de mon champ protecteur?

R: La pâte Adapt diminue le risque d'écoulement de selles ou d'urine entre votre peau et le champ protecteur. Elle protège aussi votre peau et permet, bien souvent, d'allonger la durée de vie de votre champ protecteur. La pâte n'est pas un adhésif et une trop grande quantité peut nuire à l'adhérence de celui-ci.

Q: Que faire si la pâte vient en contact avec la stomie ?

R: La pâte Adapt n'endommagera pas votre stomie et ne l'empêchera pas de fonctionner. Lorsque vous appliquez une pression contre votre champ protecteur, la pâte couvrira les inégalités de votre peau au pourtour de la stomie.

Q: Dois-je laisser la pâte durcir avant d'appliquer mon champ protecteur?

R: Certaines personnes croient que la pâte offre une meilleure adhérence si on la laisse reposer pendant un certain temps avant d'appliquer le champ protecteur.



No. de produit
79300, 2 oz. (57g)



No. de produit
79301, 0.5oz. (14g)

Q: Comment faut-il enlever la pâte ?

R: La pâte partira dès que vous retirerez votre champ protecteur. Si vous changez votre système peu de temps après l'avoir installé (moins d'une journée), il se peut qu'il reste des résidus de pâte que vous devrez enlever doucement. S'il reste de la pâte contre votre peau, mais que celle-ci vous apparaît propre, vous pourrez tout de même appliquer un nouveau champ protecteur contre celle-ci.

Q: Il arrive, à l'occasion, que la peau semble irritée ou brûlée lorsque j'utilise de la pâte Adapt. Comment est-ce possible ?

R: La pâte Adapt et d'autres pâtes pour stomies contiennent de l'alcool, pouvant ainsi causer des sensations de brûlures, si votre peau est irritée*. Les anneaux de champ protecteur Adapt ne contiennent pas d'alcool et représentent une excellente alternative pour les gens qui ont la peau sensible ou irritée.

** Une évaluation de la peau irritée, au pourtour de la stomie, devrait être réalisée par un spécialiste de la santé qui pourra ainsi déterminer la cause de ce problème et vous suggérer des moyens permettant d'éviter de tels désagréments dans le futur.*

Hollister, son logo « Attention au détail. Attention à la vie. » et Adapt sont des marques de commerce de Hollister Inc.
© 2009 Hollister Inc.
907249-CA-FR



Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048 USA
1.800.323.4060

Distribué au Canada par
Hollister Limitée
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3
1.800.263.7400

www.hollister.com