

Renseignements généraux

- Est utilisée pour absorber l'humidité provenant de la peau endommagée, autour de la stomie. Cette poudre permet une meilleure adhérence du champ protecteur, facilitant ainsi une guérison plus rapide de la peau.
- Appliquez la poudre une fois que la peau ait été lavée et séchée.



Poudre pour stomie Adapt

Comment utiliser la poudre pour stomie Adapt

1. Lavez et essuyez la peau correctement.
2. Appliquez une légère quantité de poudre pour stomie Adapt sur la partie irritée de la peau.
3. Éliminez les excès de poudre et ce, avec votre main ou un mouchoir. La poudre devrait seulement se retrouver sur les surfaces sensibles ou irritées et ne devrait pas couvrir les sections de peau saine.
4. Appliquez votre système comme d'habitude.

Les bris ou irritations de peau, autour de la stomie, sont habituellement causés par l'un des facteurs suivants :*

- Écoulements d'urine ou de selles sur la peau.
- Un champ protecteur dont l'ouverture est inappropriée (trop grande, trop petite, mauvaise forme).
- Sensibilité ou allergies à l'un des produits utilisés sur la peau.
- Retrait trop fréquent du système, pouvant mener à des déchirures de la peau.
- Des plaies à proximité de la stomie, résultant d'interventions chirurgicales.

Questions et réponses

Q: Devrais-je utiliser un tampon protecteur permettant d'assurer une meilleure adhérence de la poudre, avant l'application du champ protecteur?

R: Les tampons protecteurs comme les tampons gellodermes sont optionnels. La plupart contiennent de l'alcool, causant ainsi une sensation de brûlure lorsque appliqués sur les surfaces de peau sensibles ou irritées. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de tels tampons sur la poudre pour stomie Adapt.

Q: La poudre pour stomie Adapt contient-elle des médicaments ?

R: Non. Elle permet seulement d'absorber les excès d'humidité, permettant à votre système de demeurer bien en place. La peau peut guérir plus facilement lorsque celle-ci est protégée contre les écoulements provenant de la stomie.

Q: Est-ce que je peux utiliser d'autres poudres comme le talc, par exemple ?

R: Non, car l'emploi de poudres de type cosmétique nuira plutôt à l'adhérence de votre champ protecteur, causant ainsi des fuites et des irritations de la peau.

Q: Quand dois-je cesser d'utiliser la poudre Adapt ?

R: Cessez d'utiliser de la poudre Adapt dès que la peau est guérie et n'est plus humide au toucher. La poudre est contre-indiquée pour la prévention des irritations de la peau. Si votre peau ne s'améliore pas, cessez d'utiliser la poudre et communiquez avec votre spécialiste de la santé.

** La peau endommagée ou irritée, autour de la stomie, devrait être évaluée par un spécialiste de la santé, qui pourra déterminer la cause du problème et comment prévenir toute nouvelle irritation de la peau.*



Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048 USA
1.800.323.4060

Distribué au Canada par
Hollister Limitée
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3
1.800.263.7400

www.hollister.com

Hollister et son logo, Adapt et « Attention au détail. Attention à la vie. »
sont des marques de commerce de Hollister Inc.
© 2009 Hollister Inc.
907255-CA-FR