

Tampons protecteurs gellodermes et tampons dissolvants tout usage

Conseils pour soins de stomie

Tampons protecteurs gellodermes

Renseignements généraux

- Utilisés pour diminuer le risque d'endommager la peau lorsque vous enlevez le champ protecteur.
- Appliquez une fois que la peau ait été bien lavée et asséchée.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser un tampon gelloderme si vous utilisez un champ protecteur de port prolongé, comme le champ protecteur Flexextend de Hollister, puisqu'un tel tampon aura pour effet de réduire l'adhérence de celui-ci.

Comment utiliser le tampon gelloderme

1. Lavez et essuyez la peau correctement.
2. Ouvrez le sachet contenant le tampon et sortez-le. Appliquez une fine couche protectrice sur la surface de la peau qui sera recouverte par votre champ protecteur.
3. Attendez que la zone soit sèche au toucher.
4. Appliquez votre champ protecteur ainsi que votre sac collecteur comme à l'habitude.

Questions et réponses

Q: Devons-nous toujours utiliser des tampons gellodermes ?

R: Non, car il s'agit d'un produit optionnel. Utilisez-les si vous changez fréquemment votre champ protecteur, afin de protéger les zones plus sensibles de votre peau. Il n'est pas recommandé d'utiliser un tampon gelloderme ou tout produit similaire si vous employez un champ protecteur de port prolongé, comme le champ protecteur Flexextend de Hollister.

Q: Les tampons gellodermes rendent-ils ma peau plus collante et permettent-ils une meilleure adhérence du champ protecteur ?

R: Non, car il ne s'agit pas d'un adhésif. Ils ne font qu'ajouter une couche protectrice à la surface de votre peau.

Q: Il arrive parfois que ma peau brûle lorsque j'applique un tampon gelloderme. Comment est-ce possible ?

R: Les tampons gellodermes et autres tampons protecteurs contiennent de l'alcool, pouvant ainsi causer des sensations de brûlures lorsqu'on l'applique contre une peau irritée*. Dans ce cas, cessez d'employer les tampons gellodermes tant que la peau ne soit pas guérie.

**Une évaluation de la peau irritée, au pourtour de la stomie, devrait être réalisée par un spécialiste de la santé qui pourra ainsi déterminer la cause de ce problème et vous suggérer des moyens permettant d'éviter de tels désagréments dans le futur.*



Tampons gellodermes
code de produit no 7917

Tampons dissolvants tout usage

Renseignements généraux

- Utilisés pour enlever les champs protecteurs avec adhésifs
- Utilisés pour enlever les résidus collants laissés sur la peau

Comment utiliser les tampons dissolvants tout usage

1. Ouvrez le sachet contenant le tampon dissolvant et sortez-le.
2. Appliquez doucement le tampon contre la peau à mesure que vous retirez votre champ protecteur.
3. Appliquez le tampon sur toute surface de peau où il reste des résidus d'adhésif.
4. Nettoyez la peau avec du savon et de l'eau, rincez et séchez correctement.
5. Appliquez votre système comme d'habitude.



**Tampons Dissolvants
tout usage
code de produit no 7760**

Questions et réponses

Q: Devons-nous toujours utiliser des tampons dissolvants ?

R: Non, car il s'agit d'un produit optionnel. Utilisez les tampons dissolvants afin d'enlever les résidus d'adhésif sur votre peau, ou afin de faciliter le retrait du champ protecteur.

Q: Pourquoi dois-je laver ma peau avec du savon et de l'eau après avoir utilisé un tampon dissolvant ?

R: Ce tampon contient un solvant. Si ce dernier n'est pas complètement éliminé de votre peau, il peut nuire à l'adhérence du prochain champs protecteur que vous appliquerez, ou causer des irritations de la peau.



Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048 USA
1.800.323.4060

Distribué au Canada par
Hollister Limitée
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3
1.800.263.7400

www.hollister.com

Hollister, son logo, Flexlend et « Attention au détail. Attention à la vie » sont des marques de commerce de Hollister Inc.

© 2009 Hollister Inc.
907250-CA-FR