




## VaPro cathéter intermittent sans contact

### Procédure pour les femmes




1 Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau. Sécher soigneusement par la suite.

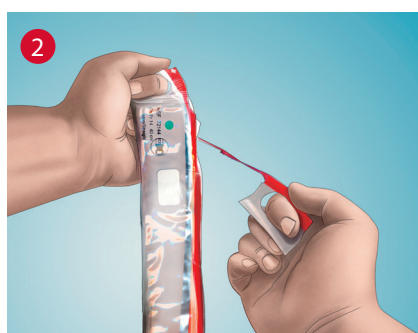


2 Pour ouvrir l'emballage du cathéter, utiliser l'orifice du haut et tirer vers vous au moins jusqu'au milieu de l'emballage.

Si nécessaire, utiliser la languette auto-adhésive se trouvant sur l'emballage pour le fixer à une surface lors de la préparation pour le cathétérisme.

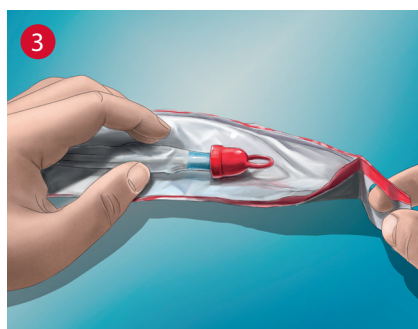

3 Laisser le cathéter dans l'emballage qui est ouvert.

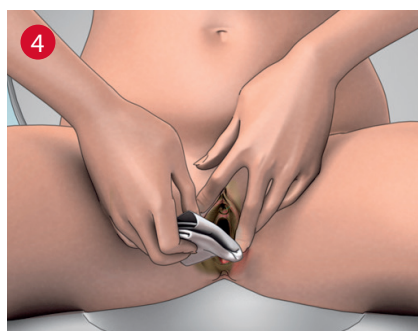

4 Écarter les lèvres et nettoyez le pourtour de l'urètre avec un savon doux, non parfumé, ou avec une lingette humide sans alcool.



5 Retirer le capuchon de l'embout protecteur du cathéter.



## VaPro cathéter intermittent sans contact


### Procédure pour les femmes




Diriger l'extrémité du cathéter en forme d'entonnoir dans un contenant approprié ou au-dessus de la toilette.



Tenir le cathéter d'une main, et de l'autre main, pousser le cathéter vers l'avant jusqu'à ce que le bout du cathéter remplisse l'embout protecteur, en prenant soin que le cathéter ne dépasse pas de l'embout protecteur.

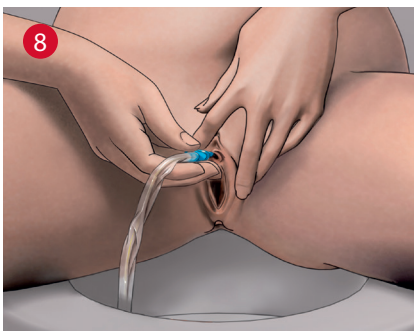

Écarter les lèvres avec deux doigts. Saisir le cathéter sous la plaque de l'embout protecteur et insérer celui-ci jusqu'à ce que la base entre en contact avec l'orifice de l'urètre. Relâcher les lèvres. **Maintenir l'embout protecteur en place.** Insérer le cathéter jusqu'à ce que l'urine commence à couler. Une fois que l'écoulement de l'urine a cessé, retirer lentement le cathéter pour s'assurer que la vessie est complètement vide. Ensuite, retirer complètement et délicatement le cathéter.

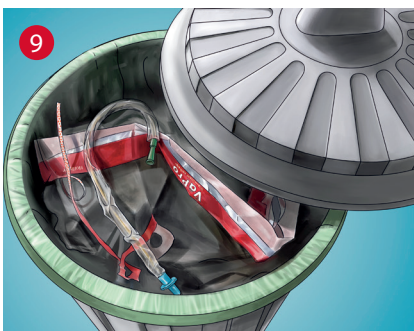

Le cathéter peut être jeté dans une poubelle. Ne pas le jeter dans la toilette.



Se laver les mains avec un savon doux et de l'eau. Sécher soigneusement par la suite.

Hollister Limited  
95 Mary Street  
Aurora, Ontario  
L4G 1G3



Le logo Hollister et VaPro sont des marques déposées de Hollister Incorporated.

922621F